

CONSIGNES D'UTILISATION DES MASQUES FFP2

Pourquoi ?

Destiné à protéger le porteur contre les risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège à fortiori aussi contre le risque de transmission par gouttelettes. Il est composé d'une pièce faciale (demi-masque ou masque complet) et d'un dispositif de filtration.

Pour qui ?

Au vu de la difficulté à se procurer ce type de masque, ces derniers doivent être utilisés avec modération. Ces masques sont principalement à destination des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) en cas d'intervention sur une personne ne portant pas de masque (ou si celui-ci doit être retiré). Eventuellement, ces masques peuvent être nécessaire pour des cas individuels identifiés par écrit par le médecin de prévention.

Conditions d'utilisations

- **Bien se laver les mains** avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque.
- Appliquer le masque de façon à **recouvrir le nez et la bouche** et veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage.
- Lorsque l'on porte un masque : **éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque.**
- Jeter le dès qu'il est mouillé ou souillé.
- Sa durée de protection varie entre trois et huit heures, mais il est difficilement supporté au-delà de quelques heures (voir recommandations du fabricant).

Après utilisation

- Retirer le masque, **l'enlever à l'arrière par l'attache.**
- Ne pas réutiliser une fois enlevé.
- **Jeter** le dans une poubelle si possible équipée d'un couvercle et munie d'un sac plastique. L'élimination se fait par la filière des ordures ménagères.

Comment mettre mon masque FFP2?

=>[lien vidéo port du masque CHU Nantes](#)

À tout moment appliquer les gestes barrières

